

# Su sonda Foley

Una sonda o catéter urinario consiste en un tubo delgado que se coloca en la vejiga para drenar la orina. La orina se drena por medio de un tubo y se recoge en una bolsa. Si lleva una sonda urinaria, los gérmenes pueden desplazarse por el catéter y causar una infección en la vejiga o el riñón; en tal caso, se produciría una infección del tracto urinario asociada a catéter urinario (o "ITU-CU").

## *¿Cómo puede prevenir las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter urinario?*

- **Pregunte** todos los días a su médico si debe seguir llevando la sonda.
- **Asegúrese** de que el tubo de la sonda esté fijado a la pierna o al abdomen si es posible.
- **Asegúrese** de que todo el personal del hospital se limpie o esterilice las manos antes y después de tocar la sonda.
- **No** doble, tire ni estire del tubo de la sonda.
- **Mantenga siempre** la bolsa de drenaje urinario por debajo del nivel de la vejiga o la cadera y por encima del suelo.
- **Evite** desconectar la sonda del tubo de drenaje.

Consulte la etiqueta y el encarte del producto para cualquier tipo de indicaciones, contraindicaciones, peligros, precauciones, cuidados e instrucciones de uso.

Bard is a registered trademark of C. R. Bard, Inc.

©2013 C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.

1309-94 R10/13